


# Sharpak Kanylburkar


## Montering

- Ställ burken på ett fast och plant underlag.
- Lägg på locket med ordet "front" mot etiketten.
- Tryck ner hörnen, ett i taget.
- Kontrollera att locket har låst fast

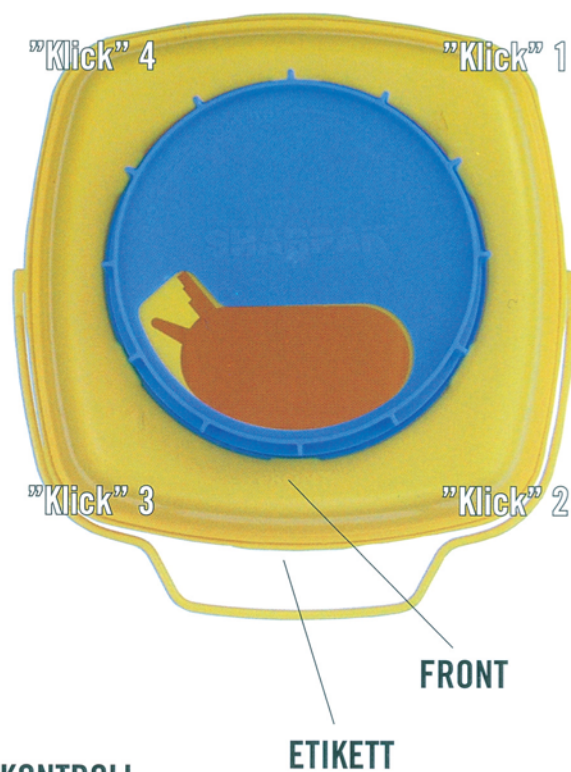

LÅSNINGSKONTROLL

ETIKETT

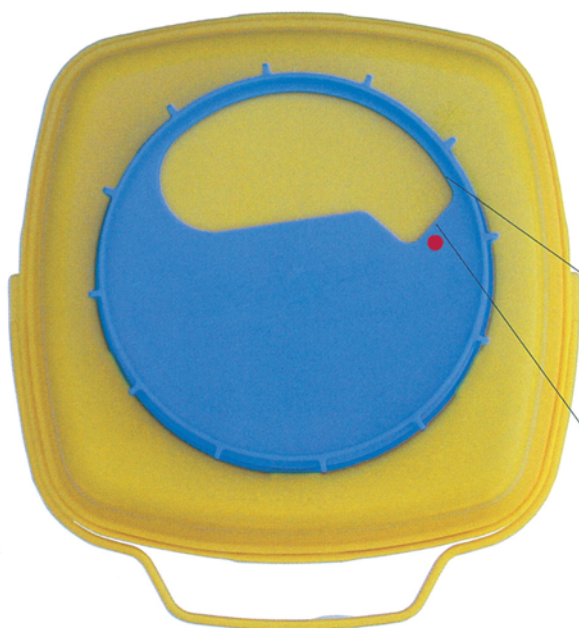

## Förslutning av burken

- Fyll inte burken mer än till "MAX" linjen.
- Vrid det blå locket tills det tar emot, läge "Closed".
- Vrid sedan lite till, texten "Locked" skall vara synlig.
- Kontrollera genom att försöka vrida tillbaks locket.
- Den röda låsknappen ska vara synlig i låst läge

CLOSED

LOCKED