


Bruksanvisning InstAlert hCG, graviditetstest för urin

Ett snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin.
Detektionsgräns: 25IU/L

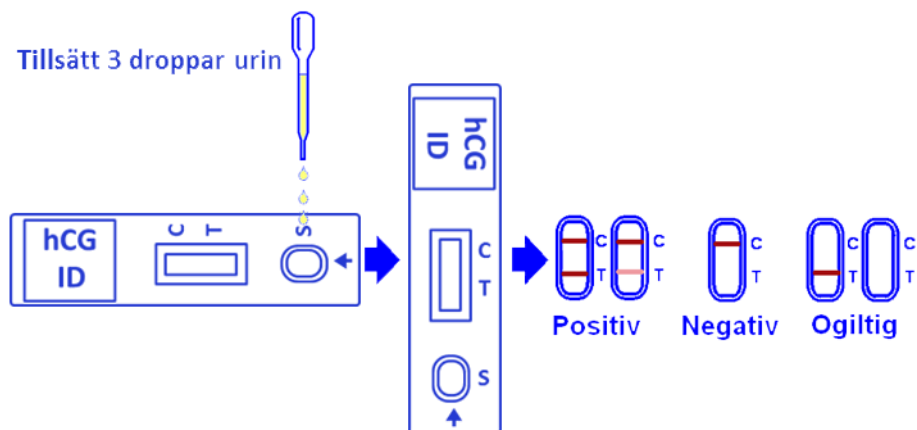

Tillvägagångssätt

Testkassett och urin ska vara rumstempererade före analys. Vid kylförvaring måste kassett eller urin tas fram i rumstemperatur 30 minuter innan testen utförs. Vid normal graviditet kan hCG upptäckas i urin så tidigt som 7 till 10 dagar efter befruktning.

1. **Tag ut testkassetten ur förpackningen och använd den snarast därefter.**
2. **Placera testkassetten på en ren och plan yta.**
3. **Droppta tre droppar urin (ca 100 µL) i testbrunnen (S). Undvik att droppta luftbubblor i testbrunnen.**
4. **Resultatet skall avläsas mellan 3-4 minuter. OBS! Avläs inte efter 4 minuter.**

Resultatavläsning

Positiv:* **Två tydliga röda linjer framträder**, en vid kontrollområdet (C) och en vid testområdet (T).

* Notera: Den röda färgens intensitet i testområdet (T) kan variera beroende av koncentrationen av hCG i urinen. Därför skall, oavsett intensitet, ett rött streck i testområdet (T) tolkas som positivt.

Negativ: **En röd linje framträder** vid kontrollområdet (C). Ingen linje framträder vid testområdet (T).

Ogiltig: Kontrollinjen framträder ej. Otillräcklig volym av urinprovet eller felaktig teknik är den vanligaste orsaken till att ett streck vid kontrollområdet inte framträder. Läs igenom proceduren samt upprepa testningen med en ny kassett.

Artikelnummer 52773