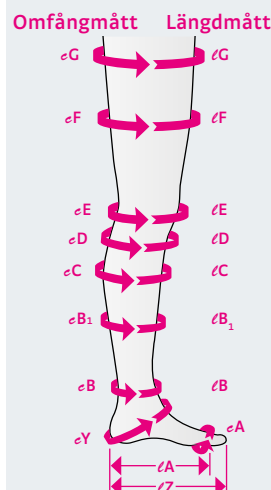


# Måttabell för rundstickade benstrumpor Standardstorlek

Denna måttabell gäller för mediven forte

## Att tänka på innan mättagning:

- Mättagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid mättagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår från golvet.

mediven forte		I	II	III	IV	V	VI	VII	
Lårstrumpa häftband x-vid	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80	
Lårstrumpa med häftband	cG	44-47	46-50	50-64	53-58	56-61	60-65	64-70	
Strumpbyxa	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80	
	Omfångmått								
	Längdmått	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
		cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
		cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
		cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
		cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
		cB <sub>1</sub>	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
		cB	<b>18-20</b>	<b>20-22</b>	<b>22-24</b>	<b>24-26</b>	<b>26-28</b>	<b>28-30</b>	<b>30-32</b>
		cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
		cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

### Viktig information

Tabellen till vänster gäller endast mediven forte.

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)				
lD	Knästrumpa	Normal	39-44	Kort 34-38
lD	mediven forte	Normal	38-43	Kort 33-37
lG	Lårstrumpa/Strumpbyxa	Normal	72-83	Kort 62-71

### Tillgängliga standard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information.

Rekommendera fotlängd max motsvarande skostorlek	
mediven forte	Liten sluten tå: 36-38, stor sluten tå 39-43

### Viktig information

Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.